

ご使用に際して、この説明文書をよくお読みになってご使用ください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

⚠ 警告

- 灸を業として行う場合は、医師またはきゅう師の資格が必要です。施術者は不測の事態に対応できるよう、施術中は患者様から目を離さず注意深く観察してください。
- 必ず「もぐさんの箱きゅう」の熱源としてご使用ください。その際「もぐさんの箱きゅう」の取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。他の器具や用途では使用しないでください。火災や器物損傷のおそれがあります。

⊘ してはいけないこと

- 周囲に燃えやすいものがあるとどこで着火しないでください。火災のおそれがあります。
- 変形させたり細かくちぎったりして使用しないでください。火傷や火災、器物損傷のおそれがあります。
- 着火剤を使用して火を付けしないでください。火災や火傷のおそれがあります。
- 着火している炭化もぐさを素手で触らないでください。火傷のおそれがあります。
- 炭化もぐさは放置しないでください。幼児など誤飲のおそれがあります。

⚠ 注意

- 医師またはきゅう師の方が施術所にて施灸される際、本商品で火傷の可能性がある事を必ず患者様へご説明ください。体質によりアレルギー症状が起こる可能性がある患者様には注意深く施灸してください。
- 取り扱いの際はピンセットをご使用ください。炭化もぐさの黒い粉が付着し、手指や衣類を汚すおそれがあります。
- 袋から出した状態で放置しないでください。劣化や汚れの原因になります。

本品の特徴

- もぐさのみを原料に使用し炭化した「もぐさんの箱きゅう」専用の炭化もぐさです（特許出願中）。添加物を使用せずもぐさを固形化・炭化しており、もぐさ本来の火付きのよさが特徴です。強い力を加えると割れ・欠けが発生しやすい性質ですので、お取り扱いにはご注意ください。
- また製造工程上発生する残留物が一部表面に付着したものがありますが、品質に問題ありません。
- メーカーでは割れ・欠けに対する検品を実施しておりますが、輸送中の衝撃などにより発生する場合があります。割れた破片や欠けた粒を燃焼させ熱源としてご使用いただく分には問題ございません。

保管方法

- 直射日光および高温多湿を避け、常温で保管してください。
- 摩擦により粒が摩擦したり粉が出ますので、袋の口をしっかりと閉じた状態で保管してください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

伊吹もぐさ製造本舗
YAMASHO 株式会社 山正
滋賀県長浜市内保町238番地2

TEL: 0749-74-0330 (代)

https://moxa.net E-mail: info@moxa.net